


1004 穿戴式靜脈注射訓練器

適合訓練靜脈注射、留置針注射、藥物注射、血液採集

- 穿戴式設計以提供超逼真的模擬情境
- 特殊可撓式設計讓產品可以完美的貼合手肘
- 背襯可防止針頭穿過皮膚塊刺入使用者手臂
- 高品質生物相容性矽膠讓皮膚不意留下針孔
- 簡約設計讓使用者易上手使用及保存

內容物

① 皮膚塊 x1 ② 凹型扣板 x4

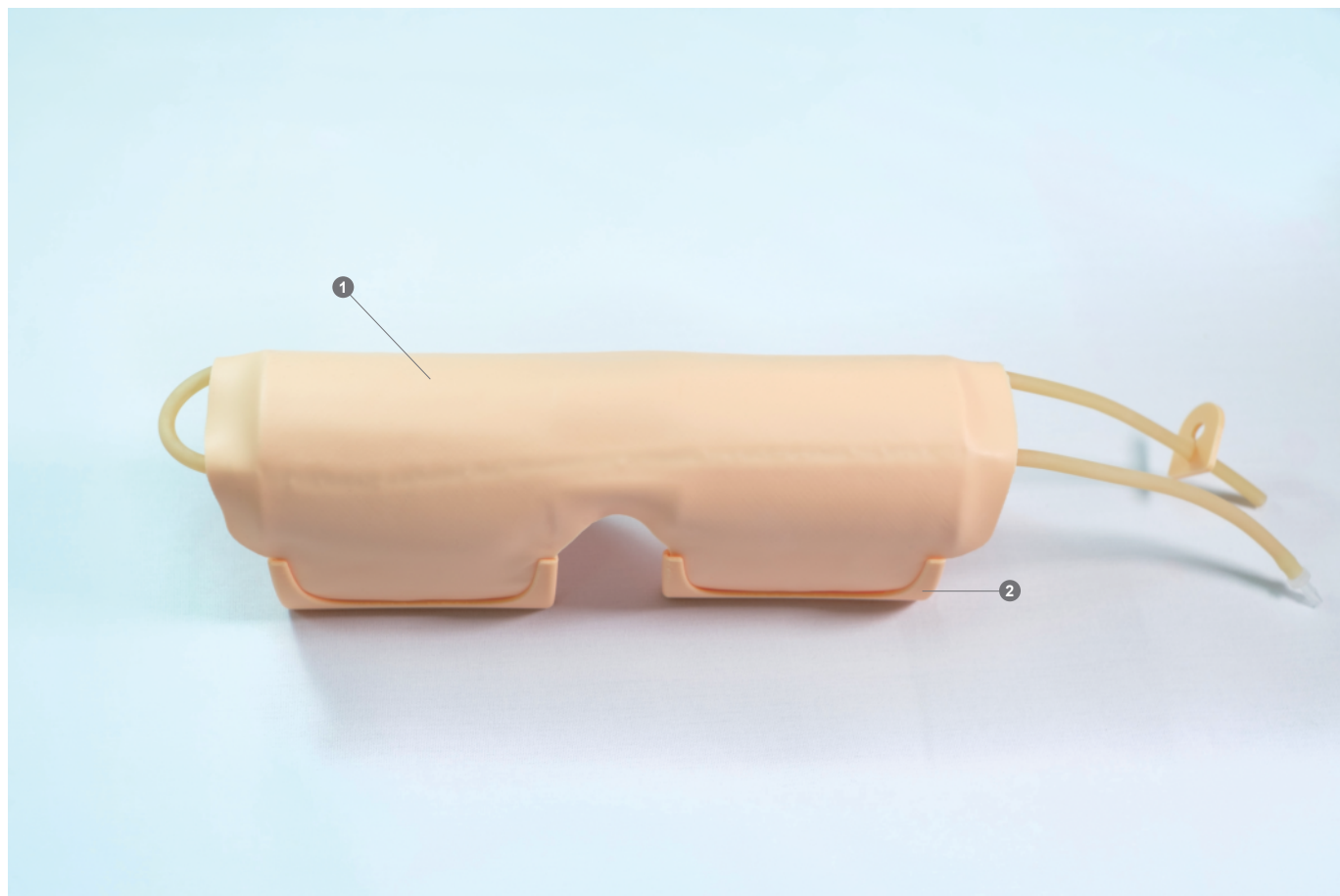

產品規格

	尺寸 (mm)	重量 (克)	材料
皮膚塊	194 x 60 x 70	100	硅膠
凹型扣板	80 x 38 x 5	25	聚乳酸

參考照片



使用說明

- ◎ 與IV手臂搭配使用：
<https://www.facebook.com/san.draw.3dprinting/videos/1250315355099904/>



- ◎ 與真人手臂搭配使用：
<https://www.facebook.com/san.draw.3dprinting/videos/1255598467904926/>



儲藏注意事項

- 將輸液管與皮膚塊分離
- 將血液或水從皮膚塊管路排出
- 用毛巾或拭紙把產品表面擦乾

注意事項

- 建議使用號數20~23之針頭以延長皮膚塊壽命
- 建議于皮膚塊塗上碘酒部位一個小時內用水將塗抹碘酒部位擦拭乾淨
- 請勿使用強酸、強鹼、酒精清洗皮膚塊
- 生理食鹽水中的鹽分可能會沉積在血管壁縮短血管使用壽命